

FRESCOPAD (Ražotājs: Jiangsu Standard-Dia Biopharma.Co. Ltd., Japāna)

Atvēsinoša, vienreizlietojama gēla loksne ar tūlītēju aukstuma efektu



Pielietojama jebkuras hipertermijas gadījumos, ķermeņa temperatūras mazināšanai. Atvieglo galvas, zobu, sasitumu u.c. sāpes.

- Nodrošina aukstuma efektu līdz 8 stundām
- Pašlīpoša
- Droši lietojama, arī kombinācijā ar medikamentozu terapiju
- Nekairina ādu
- Viegli pielīpoša ādas virsmai un viegli noņemama

Lietošanas instrukcija:

- Atveriet ārējo iepakojumu un izņemiet gēla loksni
- Noņemiet no gēla loksnes aizsargplēvi
- Pielipiniet gēla loksni vietā, kur nepieciešams aukstuma efekts
- Gēla loksne nepielips, ja āda būs mitra
- Optimālam aukstuma efektam, izmantojiet katru gēla loksni tikai vienu reizi

Piesardzība:

- Lietojiet tikai kā norādīts instrukcijā
- Tikai ārīgai lietošanai
- Nelietojiet tieši uz acīm un nāsīm
- Pārtrauciet lietot, ja novērojat ādas apsārtumu, izsitumus, niezi, kairinājumu un konsultējieties ar savu ārstu
- Lietojiet gēla loksni bērniem tikai pieaugušo uzraudzībā
- Ja jums ir jutīga āda, pirms gēla loksnes lietošanas, konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu
- Ja ķermeņa temperatūra pārsniedz 39°C, meklējiet medicīnisku palīdzību

Uzglabāšana:

- Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem
- Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā

