



## HIGIĒNAS SISTĒMA ŠĪBERA PĀRVALKS

# ANGIMED

Inovatīvi tualetes maisiņi, satur absorbējošu un aromatizējošu pulveri, kas pārvērš šķidrumu cietas konsistences vielā.

### Aromatizē un sacietē, neitralizē smakas

**Apraksts:** Vienreizējas lietošanas balta polietilēna maisiņš ar augšējā malā iestrādāti pašlīmējošu joslu – šībera pārvalks, kura iekšpusē ir absorbējošs pulveris *SGAIEL*®, kas pārveido šķidrumu gēlā un neitralizē nepatīkamu aromātu, novērš baktēriju vairošanos. *SGAIEL*® absorbenta pulveris ir ievietots ūdenī šķīstošā apvalkā, kas izšķīst, nonākot kontaktā ar šķidrumu. Gatavs lietošanai!

**Iepakojums un izmēri:** 20 tualetes maisiņi, 500x600mm.

**Lietošanas mērķis:** vienreiz lietojama atkritumu savākšanas sistēma – šībera pārvalks (urīna un fekāliju masām).


**Materiāls:** Poliuretāns. Pulverveida nātrija poliakrilāts ar aromatizējošām īpašībām.

### Lietošanas instrukcija:

1. Izņemiet maisiņu, kura iekšpusē atrodas gatavs darbībai absorbējošs *SGAIEL* pulveris, ietverts šķīstošā apvalkā.
2. Ieklājiet maisiņu šīberī un atlokiet maisiņa augšējo malu aiz šībera apmales, pilnībā aplājot šīberī.
3. Tiklīdz urīna/fekāliju masas ieguvušas želejveida/cietu konsistenci (tas notiek dažu sekunžu laikā), aizveriet maisiņu noslēdzot to ar augšējā malā iestrādāto pašlīmējošās joslas palīdzību.
4. Maisiņu kopā ar tā saturu var izmest sadzīves atkritumu konteinerā.



I KLASĒS MEDICĪNAS IERĪCE SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 93/42 EC UN DIREKTĪVU 2007/47/CE

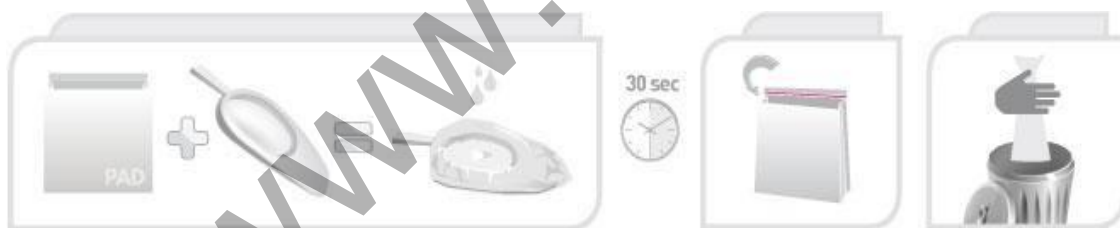

Ražotājs: Angimed S.r.l

Via Ra\_aele Camiscia 4/6 - 65010 MOSCUFO PE - ITALIA

Tel. 085.975035 FAX 085.9960203

Izplatītājs Baltijas valstīs: SIA BIOMARK, Brīvības gatve 261, Rīga, LV-1006, tālr. 27 328 255