

Happy Cover PP tualetes maisiņi (urīna savākšanai), satur aromatizējošu medicīnisko superabsorbentu SGAIEL®, kas pārvērš šķidrumu cietas konsistences vielā.

### Aromatizē un sacietē, neitralizē smakas

**Apraksts:** Happy Cover PP maisiņš - vienreizējas lietošanas maisiņš no zaļa polietilēna ar noslēdzošu līmlentas malu, gatavs lietošanai, kura iekšpusē ir augstas absorbcijas spējas medicīniskais absorbents SGAIEL®, kas pārvērš atvērtās masas gēlā. Nodrošina lietošanas diskretumu un ērtības, neitralizē nepatīkamu aromātu un aptur baktēriju vairošanos. Vemšanas maisiņā esošā SGAIEL® absorbenta 10 g deva ir ievietota ūdenī šķīstošā apvalka paciņā, kas izšķīst un sāk darboties, nonākot kontaktā ar šķidrumu..

**Produkta kods: AM002**

**Iepakojums un izmēri:** 20 tualetes maisiņi, 160x380mm.

**Lietošanas mērķis:** vienreiz lietojama atkritumu savākšanas sistēma (urīnam).


**Materiāls:** Maisiņš – polietilēns HDPE. SGAIEL® medicīniskais superabsorbents - pulverveida nātrija poliakrilāts ar aromatizējošām īpašībām.

### Lietošanas instrukcija:

1. Izņemiet no iepakojuma Happy Cover PP maisiņu, kura iekšpusē atrodas gatava darbībai absorbējoša SGAIEL®pulvera paciņa šķīstošā apvalkā.
2. Atveriet Happy Cover PP maisiņa augšgalu un izmantojiet maisiņu urinēšanai.
3. Tiklīdz urīns veidojis želejveida/cietu konsistenci (tas notiek dažu sekunžu laikā), aizveriet maisiņu.
4. Maisiņu kopā ar tā saturu var izmest sadzīves atkritumu konteīnerā.



I KLASĒS MEDICĪNAS IERĪCE SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 93/42 EC UN DIREKTĪVU 2007/47/CE

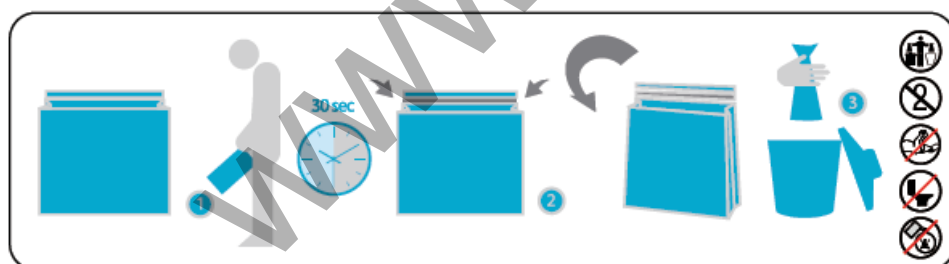

Ražotājs: Angimed S.r.l

Via Ra\_aele Camiscia 4/6 - 65010 MOSCUFO PE - ITALIA

Tel. 085.975035 FAX 085.9960203

Izplatītājs Baltijā: SIA BIOMARK, Brīvības gatve 261, Rīga, LV-1006, tālr. 27 328 255