

HAPPYcover®

HIGIĒNAS SISTĒMA ATVEMTO MASU SAVĀKŠANAS SISTĒMA

RiG

ANGIMED

Happy Cover RiG tualetes maisiņi (atvemto masu savākšanai), satur aromatizējošu medicīnisko superabsorbentu SGAIEL®, kas pārvērš šķidrumu cietas konsistences vielā.

Aromatizē un sacietē, neitralizē smakas



Apraksts: Happy Cover RiG maisiņš - vienreizējas lietošanas maisiņš no zila polietilēna ar noslēdzošu līmlentas malu, gatavs lietošanai, kura iekšpusē ir augstas absorbcijas spējas medicīniskais absorbents SGAIEL®, kas pārvērš atveiktās masas gēlā. Nodrošina lietošanas diskretumu un ērtības, neitralizē nepatīkamu aromātu un aptur baktēriju vairošanos. Vemšanas maisiņā esošā SGAIEL® absorbenta 5 g deva ir ievietota ūdenī šķīstošā apvalka paciņā, kas izšķīst un sāk darboties, nonākot kontaktā ar šķidrumu..

Produkta kods: AM003

Iepakojums un izmēri: 20 tualetes maisiņi, 250x250mm.

Lietošanas mērķis: vienreiz lietojama atkritumu savākšanas sistēma (atveiktajām masām).

Paredzēta izmantošanai ātrās palīdzības mašīnās, slimnīcu uzņemšanas, gastroenteroloģijas, onkoloģijas u.c. nodaļās. Noderīgs arī bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no sliktas dūšas, tai skaitā ceļojumu laikā.


Materiāls: Maisiņš – polietilēns HDPE. SGAIEL® medicīniskais superabsorbents - pulverveida nātrija poliakrilāts ar aromatizējošām īpašībām.

Lietošanas instrukcija:

1. Izņemiet no iepakojuma Happy Cover RiG maisiņu, kura iekšpusē atrodas gatava darbībai absorbējoša SGAIEL® pulvera paciņa šķīstošā apvalkā.
2. Atveriet Happy Cover RiG maisiņa augšgalu un izmantojiet maisiņu vemšanai.
3. Tiklīdz atveiktās masas veidojušas želejveida/cietu konsistenci (tas notiek dažu sekunžu laikā), aizveriet maisiņu.
4. Maisiņu kopā ar tā saturu var izmest sadzīves atkritumu konteinerā.



I KLASĒS MEDICĪNAS IERĪCE SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 93/42 EC UN DIREKTĪVU 2007/47/CE

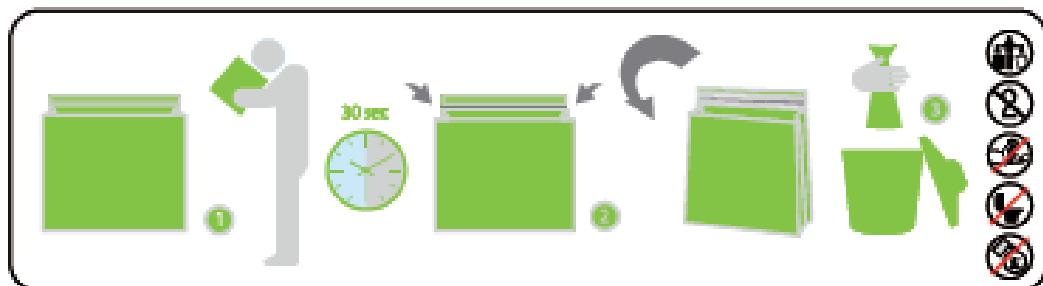

Ražotājs: Angimed S.r.l

Via Ra_aele Camiscia 4/6 - 65010 MOSCUFO PE - ITALIA

Tel. 085.975035 FAX 085.9960203R

Izplatītājs Baltijā: SIA BIOMARK, Brīvības gatve 261, Rīga, LV-1006, tālr. 27 328 255