



SUPERABSORBENTA PULVERIS DISPENSEROS

Augstas absorbcijas spējas medicīniskais pulverveida absorbents SGAIEL[®], kas pārvērš šķidrumu gēlā.

Apraksts:

Patentēta molekula - pulverveida medicīniskais absorbents "SGAIEL[®]"

Absorbents uz tīklveida nātrija poliakrilāta bāzes, kas nonākot kontaktā ar šķidrumu un ūdens bāzes šķīdumiem pārvērš tos gēlā. Spēj absorbēt 60-500 reizes lielāku šķidruma tilpumu nekā paša absorbenta apjoms.

Daļiņu izmērs < 220µ. Bez smaržas. Gatavs lietošanai.

Darbības mehānisms

Gelifikācijas process 30 sekundēs, pārtrauc urīnvielas sadalīšanos amonjakā, tādējādi, novēršot smakas izplatīšanos, kā arī fiziski izolējot šķidrumu gēla masā, tiek pārtraukti oksidēšanās procesi skābekļa klātbūtnē, tādējādi novēršot baktēriju vairošanos.

Pielietojums:

Izmantojams jebkurā slimnīcas nodaļā, kur notiek lielas šķidrumu noplūdes: operāciju zālēs, dzemdību nodaļās, ceļgala artroskopijas procedūru laikā u.c.

Iepakojums:

AM005 – 200g

AM004 – 400g

AM006 – 1000 g

Lietošana:

1. Uzberiet šķidrumam dažus gramus SGAIEL pulvera.
2. Pagaidiet 30 sekundes.
3. Tūlīt pēc šķidruma pārvēršanās gēlā savāciet to.
4. Savāktu masu var utilizēt kā sadzīves atkritumus.

Pirmā palīdzība:

Kontakts ar ādu: mazgāt ar ūdeni un ziepēm

Kontakts ar acīm: mazgāt ar lielu daudzumu ūdens ilgu laiku

Neizraisa sensibilizāciju cilvēkiem un dzīvniekiem.

Utilizācija: Sadzīves atkritumos. Ja pacients ir inficēts/slims, iznīcināt kā inficētos atkritumus.

Stabilitāte un reaģētspēja: Normālos pielietošanas apstākļos stabils. Sadalās >200°C. Glabāt sausā vietā.



I KLASĒS MEDICĪNAS IERĪCE SASKAŅĀ AR DIREKTĪVU 93/42 EC UN DIREKTĪVU 2007/47/CE

Ražotājs: Angimed S.r.l

Via Ra_aele Camiscia 4/6 - 65010 MOSCUFO PE - ITALIA

Tel. 085.975035 FAX 085.9960203RE

Izplatītājs Baltijas valstīs: SIA BIOMARK, Brīvības gatve 261, Rīga, LV-1006, tālr. 27 328 255