

# SPECIFICATIONS

## ROMED PILL CUTTER

### REF: PC-480



Medical device conform MDD 93/42/EEC

Pill cutter can be used to cut pill exactly in half for easier swallowing or to ingest only half the dose of the medication. It is safe and easy to use. With locking button, protect user from potential injury from sharp stainless steel blade.

Materials: Plastic, stainless steel  
Length: 8.5cm  
Width: 3.5cm  
Height: 2.8cm  
Weight: 30g

#### DIRECTIONS FOR USE

1. To open, simply press on the locking bar.
2. While pushing the locking bar in, lift up on cover.
3. Place pill into the "V" shaped holder.
4. Close cover to split pill.
5. Repeat opening process and remove pill halves.
6. Close cover and store in closed position.

Packing: Each in a box, 24 pieces in an inner box, 480 pieces in an export carton.

**SPECIFIKĀCIJA**  
**ROMED TABLEŠU PĀRŠĶĒLĒJS**  
**REF: PC-480**



Medicīniskā ierīce atbilst MDD 93/42/EEC

Tablešu pāršķelējs var tikt izmantots tablešu pāršķelšanai tieši uz pusi, lai vieglāk norīt, vai uzņemt tikai pusi zāļu devas. Tas ir drošs un viegli lietojams. Ar fiksēšanas pogu, pasargā lietotāju no asa nerūsējošā tērauda asmeņa traumas.

Materiāls: Plastmasa, nerūsējošais tērauds  
Garums: 8.5cm  
Platums: 3.5cm  
Augstums: 2.8cm  
Svars: 30g

#### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Lai atvērtu, vienkārši nospiediet uz bloķēšanas fiksatora.
2. Vienlaikus nospiežot bloķēšanas fiksatoru, paceliet vāciņu.
3. Ievietojiet tableti V formas turētājā.
4. Aizveriet vāciņu, lai sadalītu tableti.
5. Atkārtojiet atvēršanas procesu un izņemiet tablešu pusītes.
6. Aizveriet vāciņu un uzglabājiet ierīci slēgtā stāvoklī.

Iepakojums: katra ierīce savā kastītē, 24 gabali iekšējā kastē, 480 gabali eksporta kartona kastē

*Tulkojums pareizs!*

M.Boka  
SIA „BIOMARK”  
Valdes locekle  
Rīgā, 2018. gada 17. jūlijā