

Lietošanas instrukcija

Nomazgājiet rokas pirms maskas uzvilšanas

1. Pieskarieties tikai gumijas saitēm
2. Uzvelciet masku, lai tā noklātu degunu un muti, atstājot minimālu atstarpi starp masku un seju
3. Nostipriniet gumijas saites aiz ausīm
4. Saspiediet deguna klipsi, pielāgojot masku tā, lai tā blīvi apķertu degunu
5. Hermetizācijas tests: uzlieciet abas rokas uz maskas un izelpojiet. Ja Jūs jutāt, ka gaiss iziet brīvi cauri ap degunu, tad noregulējiet metāla klipsi
6. Šī FFP2 maska ir paredzēta elpošanas sistēmas aizsardzībai pret gaisa daļiņām, izņemot daļiņas avārijas situācijās.
7. Ļoti mazticams, ka sejas apmatojums var ietekmēt maskas uzvilšanas hermētiskumu.

Nemazgājiet produktu, produkts nav ugunsdrošs, neturiet produktu sprādzienbīstamās vietās.

Rekomendējamais izmantošanas laiks: maks. 8 stundas.

www.biomark.lv